



Gebrauchsanleitung für den Mini-Inkubator

Das Gerät im handlichen Desktop-Format kann gleichzeitig bis zu 10 Tests bei einer Temperatur von 37 C° inkubieren. Der Mini-Inkubator arbeitet im Niedrigvoltbereich (12V) und wird mit einem Netz-Adapter geliefert. Optional kann das Gerät auch mit einem Spezialkabel im Auto betrieben werden. Den Strom erhält es dann aus dem Zigarettenanzünder.

Warnhinweis: Nur den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter verwenden. Der Adapter für den Zigarettenanzünder ist durch eine Sicherung mit 1,5 Ampere abgesichert, der normale Adapter mit einem Überspannungsschutz ausgestattet.

Bitte schalten Sie das Gerät bereits 30 bis 40 Minuten vor dem Gebrauch ein, damit das Gerät seine optimale, stabile Betriebstemperatur erreichen kann. Das Gerät arbeitet dann korrekt, wenn sich die Oberfläche bei Berührung warm anfühlt. Ein als Zubehör erhältliches Thermometer kann auf Wunsch in der seitlich alleinstehenden Mulde platziert werden.

Auf der Gerätunterseite befindet sich ein Aufkleber vom Kontrolltest. Aufgedruckt ist das Durchschnittsergebnis eines dreißigminütigen Tests bei einer Raumtemperatur von 18°C, der im letzten Stadium der Geräteherstellung bei zwei beschickten Mulden durchgeführt wurde.